



## NOTICE A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION

Avant la première utilisation de cette bouillotte, veuillez prendre connaissance des précautions d'utilisation ci-dessous.

### A. Avantages

Cette bouillotte vous accompagne partout : chez vous, au bureau ou pendant vos loisirs. Elle chauffe instantanément dès que vous le souhaitez : pour apaiser, se réchauffer, se détendre, ou se décontracter. Passée au réfrigérateur, elle vous offre toutes les vertus apaisantes ou rafraîchissantes du froid.

### B. Utilisation à chaud

Presser la pastille métallique entre 2 doigts de façon à inverser le sens du galbe. Clic ! Malaxer la bouillotte pendant quelques secondes pour bien l'assouplir et mieux répartir la chaleur. Appliquer sur les zones choisies ; la chaleur se diffuse entre 30mn et 3h selon la taille et l'usage. La bouillotte se solidifie en refroidissant. Pour réactiver les propriétés chauffantes de votre bouillotte, il vous suffit de l'immerger 10 à 15 mn (selon la taille) dans une eau en ébullition (ne pas éteindre le feu sous la casserole mais laisser frémir à feu doux). Il est impératif de protéger votre bouillotte pendant la régénération (par exemple dans un linge). Après régénération, la bouillotte reprendra alors son aspect totalement liquide et parfaitement limpide. Ne pas retirer la bouillotte de l'eau tant qu'il reste des cristaux, elle se resolidifierait en quelques minutes.

Après régénération, laisser refroidir ou profiter de la chaleur emmagasinée lors de cette phase en l'utilisant comme une bouillotte traditionnelle (attention la bouillotte est chaude !) Lorsque la Bouillotte Magique aura refroidi, elle sera de nouveau prête à être cliquée.

### C. Utilisation à froid


Protéger la bouillotte dans un linge ou un sac de congélation. Conserver la bouillotte au réfrigérateur (5°/8° C) ou la placer une dizaine de minutes dans le freezer ou le congélateur. Appliquer sur les zones choisies.

Depuis plus de 10 ans, La Bouillotte Magique™ est la marque de référence et ne cesse d'innover pour votre confort et votre bien-être. Souvent copiée mais jamais égalée, méfiez-vous des imitations.

Cette bouillotte a été fabriquée avec le plus grand soin dans des matériaux lui assurant longévité et sécurité maximum.

La Bouillotte Magique contient de l'acétate de sodium tri-hydraté (CH<sub>3</sub>-COONa-3H<sub>2</sub>O).

Si vous rencontrez un problème dans le cadre d'une utilisation normale, nous vous invitons à contacter votre revendeur habituel, avec votre justificatif d'achat.

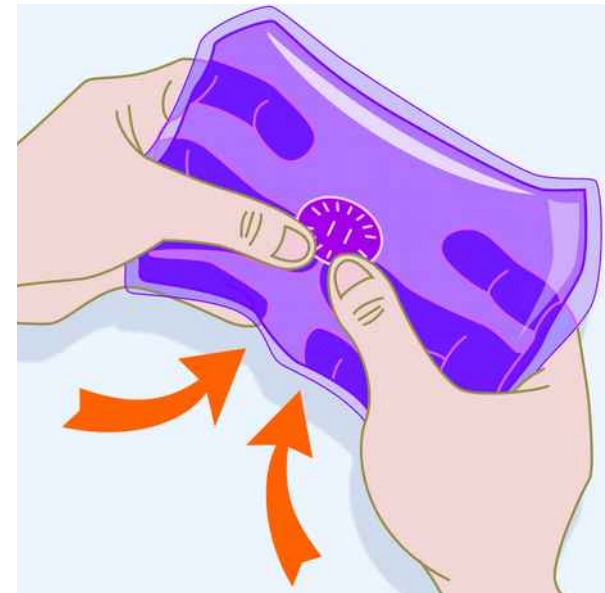

### D. Précautions d'utilisation

- Utilisation externe uniquement. A utiliser uniquement selon la procédure décrite.
- Ne pas mettre au micro-ondes ou au four ou grill traditionnels.
- Veiller à protéger la bouillotte dans un linge pendant la régénération.
- Ne pas s'asseoir ni se coucher sur la bouillotte, ne pas exercer une pression excessive qui pourrait rompre ou percer l'enveloppe.
- Si vous percez votre bouillotte accidentellement, rincez soigneusement à l'eau claire la peau ou les vêtements.
- Ce produit n'est pas un jouet : il s'utilise sous la responsabilité d'un adulte. Tenir hors de portée des enfants ou de personnes porteuses d'un handicap cognitif.
- Ne pas appliquer directement sur la peau, à chaud comme à froid : utiliser une housse ou un linge de protection.
- La bouillotte ne doit pas être utilisée si la poche extérieure est usée ou abîmée, ou en cas de fuite.
- Prendre garde aux brûlures quand la bouillotte est chaude.
- Ne pas poser d'épingle près de la bouillotte, elle risquerait d'être percée.
- Ne pas utiliser en cas d'insensibilité à la chaleur, d'insuffisance veineuse ou d'ulcère variqueux.
- Ne pas mettre en contact d'une région cutanée atteinte d'une maladie de peau ou d'une peau lésée.
- Ne pas ingérer le contenu de la bouillotte.
- Si vous constatez que la bouillotte se resolidifie après avoir été régénérée, il convient de la replonger quelques minutes dans l'eau chaude jusqu'à ce qu'elle soit complètement limpide.