




La Bouillotte Magique

BOUILLOTTE A PERLES

FR

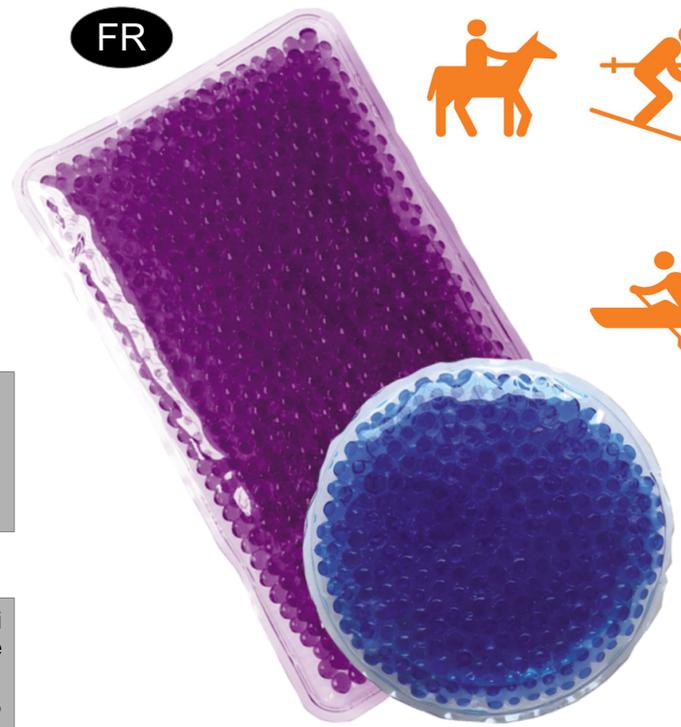

NOTICE A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION

Avant la première utilisation de cette bouillotte, veuillez prendre connaissance des précautions d'utilisation ci-dessous.

A. Avantages

Cette bouillotte est idéale pour une utilisation à chaud et à froid, et épouse parfaitement les formes de votre corps. Elle chauffe en quelques secondes : pour apaiser, se réchauffer, se détendre, ou se décontracter. Passée au congélateur, elle restera souple et agréable, pour vous offrir toutes les vertus apaisantes ou rafraichissantes du froid.

B. Utilisation à chaud



Placer la bouillotte au four micro-ondes (800W) pendant 20 secondes. Si elle n'est pas assez chaude, la replacer au micro-ondes pour une durée de 5 secondes à chaque fois, en malaxant entre chaque passage. Ne jamais dépasser la durée de 60 secondes cumulées au micro-ondes, au risque de provoquer la rupture de l'enveloppe. Appliquer sur les zones choisies.



Vous pouvez aussi la plonger dans une casserole d'eau très chaude (environ 80°C) pendant 4 à 5 minutes, en veillant à la protéger des bords et du fond de la casserole (par exemple dans un linge).

Après utilisation, laisser refroidir la bouillotte puis la ranger jusqu'à la prochaine utilisation.

C. Utilisation à froid



Placer la bouillotte dans un linge ou un sac de congélation, puis la mettre au freezer ou au congélateur (jusqu'à -18°C) pendant 1 à 2 heures. Appliquer sur les zones choisies. Les perles resteront souples et agréables.

Depuis plus de 10 ans, La Bouillotte Magique™ est la marque de référence et ne cesse d'innover pour votre confort et votre bien-être. Souvent copiée mais jamais égalée, méfiez-vous des imitations.

Cette bouillotte a été fabriquée avec le plus grand soin dans des matériaux lui assurant longévité et sécurité maximum.

La Bouillotte Magique à perles contient un polymère super absorbant et de l'eau.

Si vous rencontrez un problème dans le cadre d'une utilisation normale, nous vous invitons à contacter votre revendeur habituel, avec votre justificatif d'achat.

D. Précautions d'utilisation

- Utilisation externe uniquement. A utiliser uniquement selon la procédure décrite.
- Ne pas mettre au four ou grill traditionnels.
- Veiller à protéger la bouillotte dans un linge si vous la placez dans une casserole d'eau chaude.
- Ne pas s'asseoir ni se coucher sur la bouillotte, ne pas exercer une pression excessive qui pourrait rompre ou percer l'enveloppe.
- Si vous percez votre bouillotte accidentellement, rincez soigneusement à l'eau claire la peau ou les vêtements.
- Ce produit n'est pas un jouet : il s'utilise sous la responsabilité d'un adulte. Tenir hors de portée des enfants ou de personnes porteuses d'un handicap cognitif.
- Ne pas appliquer directement sur la peau, à chaud comme à froid : utiliser une housse ou un linge de protection.
- La bouillotte ne doit pas être utilisée si la poche extérieure est usée ou abîmée, ou en cas de fuite.
- Prendre garde aux brûlures quand la bouillotte est chaude.
- Ne pas poser d'épingle près de la bouillotte, elle risquerait d'être percée.
- Ne pas utiliser en cas d'insensibilité à la chaleur, d'insuffisance veineuse ou d'ulcère variqueux.
- Ne pas mettre en contact d'une région cutanée atteinte d'une maladie de peau ou d'une peau lésée.
- Ne pas ingérer le contenu de la bouillotte.
- Les perles peuvent commencer à fondre après plusieurs utilisations. Les vertus et les instructions d'utilisation de la bouillotte restent inchangées.

